



Для техников!

ML ET, ML CT, ML HT многослойные (пятислойные) по системе 3D.

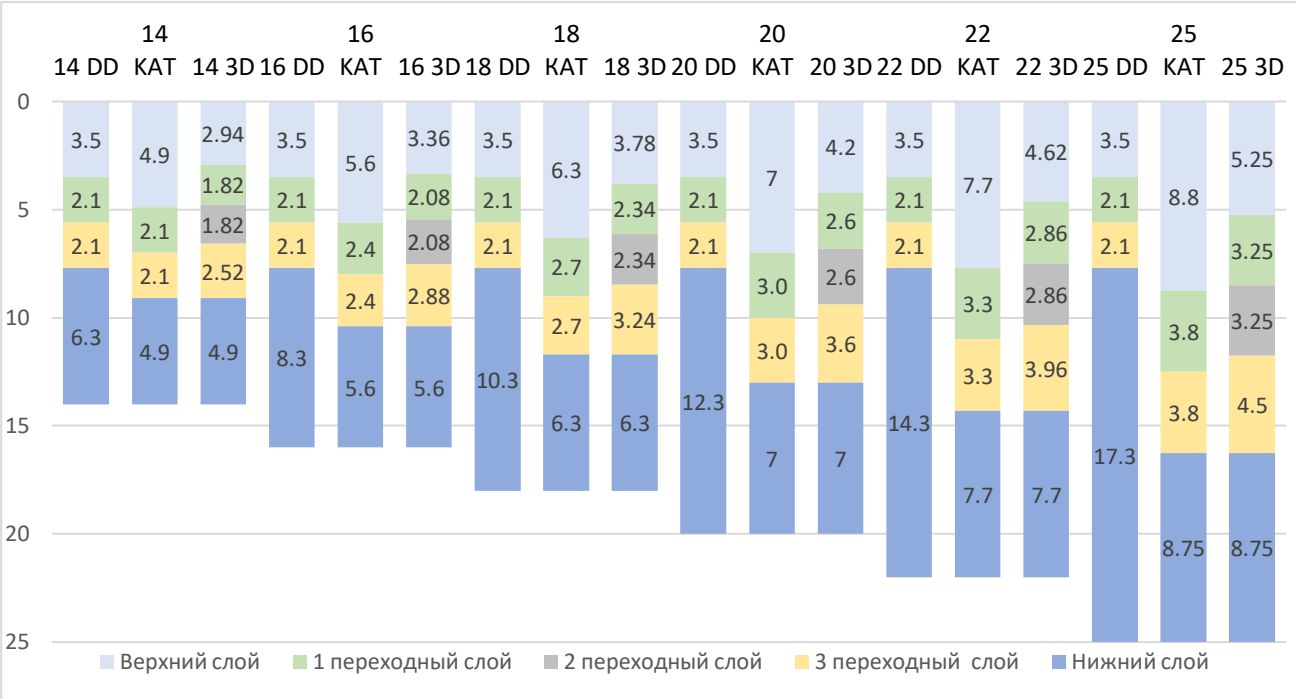

Для техников!


ML ET, ML CT, ML HT многослойные (пятислойные) по системе 3D.

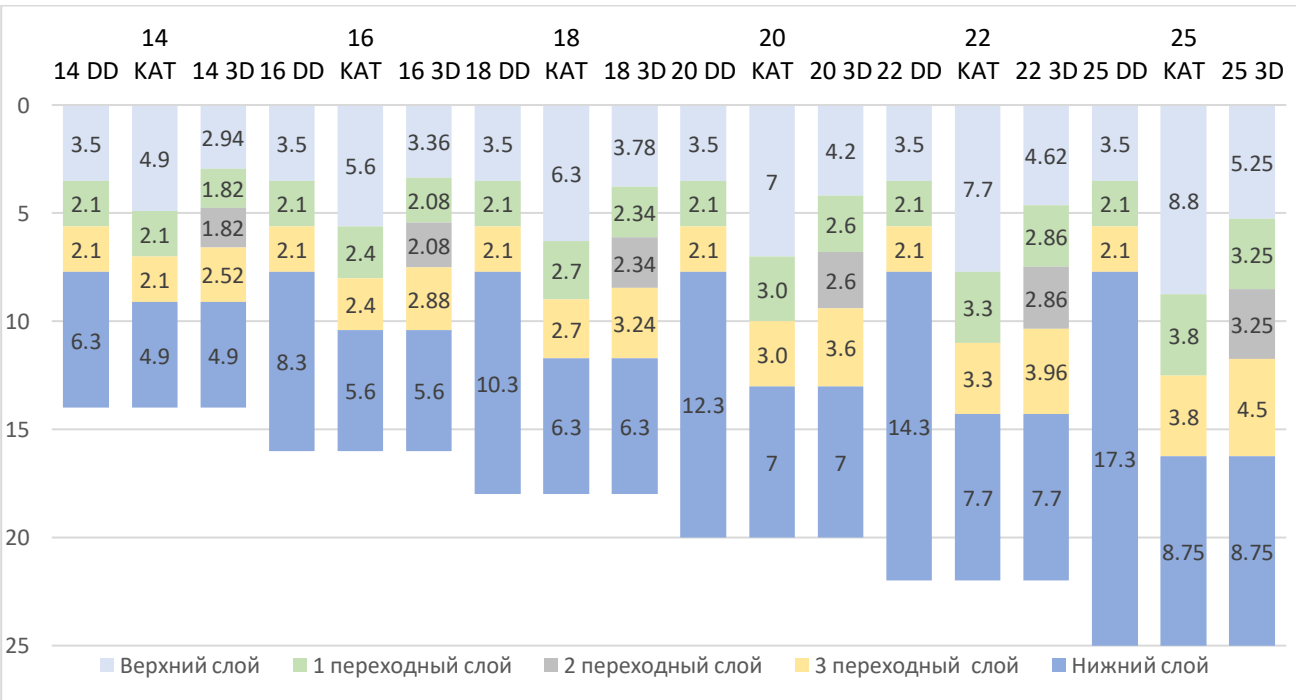

ML ET многослойные (TOSON)

В таблице 4-х слойные диски

4-слойные диски (система слоёв KATANA) на примере дисков группы А					
Позиция	Соотношение	ML (A1-A2)	ML (A2-A3)	ML (A3-A3,5)	ML (A3,5-A4)
Верхний (эмалевый) слой	35%	A1	A2	A3	A3,5
Промежуточный слой 1	15%	A1-a2	A2-a3	A3-a3.5	A3.5-a4
Промежуточный слой 2	15%	A2-a1	A3-a2	A3.5-a3	A4-a3.5
Нижний (дентинный) слой	35%	A2	A3	A3,5	A4

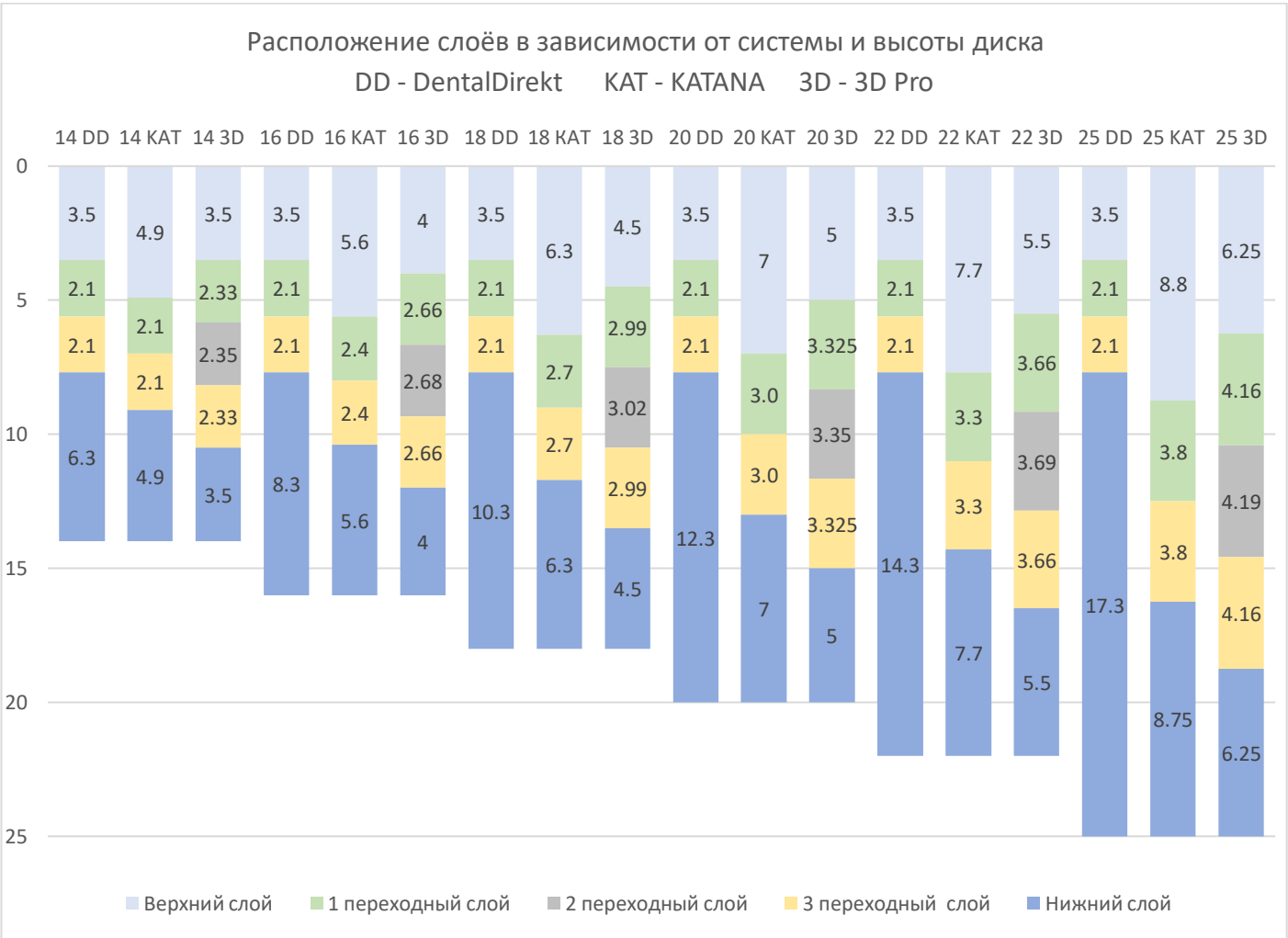

ML CT многослойные(TOSON)

На данный момент CT диски выпускаются по 4-х слойной системе слоёв DentalDirekt (DD)

4-слойные диски (система слоёв DD) на примере дисков группы А							
Позиция	Соотношение	Прозрачность	ML A1	ML A2	ML A3	ML A3.5	ML 4
Верхний (эмалевый) HT слой	3.5 mm	49%	A1 HT	A2 HT	A3 HT	A3.5 HT	A4 HT
Промежуточный слой 1	2.1 mm	48%	A1 HT-a1 ET	A2 HT-a2 ET	A3 HT-a3 ET	A3.5 HT-a3.5 ET	A4 HT-a4 ET
Промежуточный слой 2	2.1 mm	46%	A1ET-a1HT	A2 ET-a2 HT	A3ET-a3HT	A3.5 ET-a3.5 HT	A4 ET-a4 HT
Нижний (дентинный) ET слой	H – 7.7 mm	45%	A1 ET	A2 ET	A3 ET	A3.5 ET	A4 ET

Таблица расположения слоёв в зависимости от системы

Расположение слоёв в зависимости от системы и высоты диска

DD - DentalDirekt KAT - KATANA 3D - 3D Pro

